



CO?	ČÍM?	JAK?	KDY?	KDO?	
 plochy a povrchy	Čištění a dezinfekce povrchů citlivých na alkohol.	Velox® Foam Extra Velox® Wipes NA	Nastříkejte na celý povrch, počkejte 5 minut. V případě potřeby setřete suchým hadříkem nebo otřete ubrouskem Direct Wipes NA a nechte uschnout.	V případě kontaminace nebo v případě potřeby.	
	Mytí a postřiková dezinfekce neinvazivního zdravotnického vybavení, např. zubních souprav, nábytku.	Velox® Wipes NA Velox® Spray	Nastříkejte / setřete povrch a počkejte 30 sekund nebo do úplného uschnutí.	Před a po každém použití, v případě kontaminace nebo v případě potřeby.	
	 lékařské zařízení	Suché utěrky v dóze pro kombinaci s koncentráty či připravenými roztoky.	Medisept Dry Wipes	Dle použitého dezinfekčního přípravku.	Před a po každém použití, v případě kontaminace nebo v případě potřeby.
		 dentální koncovky	Čištění a dezinfekce stomatologických nástrojů.	Velox® Spray Velox® Wipes NA	Nastříkejte / setřete povrch a počkejte 30 sekund nebo do úplného uschnutí.
 velké plochy	Mytí a dezinfekce velkých voděodolných zdravotnických ploch a povrchů.	Quatroles® Extra	0,5% = 15 minut. (5 ml na 995 ml vody).	Na konci každého pracovního dne nebo v případě potřeby.	
 zubní soupravy a sací zařízení	Čištění a dezinfekce odsávacích zařízení, hadic, separátorů amalgámu a plivátka zubní soupravy.	Quatroles® Unit NF	Nalijte do plivátka, nasajte savkami, nechte působit. Propláchněte vodou.	Pokud možno po každém použití, kdy bylo odsáváno (obzvláště krev). Na konci každého pracovního dne.	
 chirurgické nástroje	Čištění a dezinfekce chirurgického a rotačního instrumentária.	Viruton® Forte	0,5% = 30 minut (5 ml na 995 ml vody). Poté do roztoku ponořte nástroje na 30 minut. Opláchněte čistou vodou.	Ihned po použití.	
	 rotační nástroje	Čištění a dezinfekce rotačního instrumentária.	Viruton® Bohr	Ponořte na 15 minut do produktu připraveného k použití. Poté opláchněte, vysušte a sterilizujte.	Ihned po použití.
 dezinfekce rukou	Hygienická a chirurgická dezinfekce rukou.	Velodes® Gel	Dostatečné množství gelu naneste na ruce a pečlivě rozetřete. Nechte působit 30 sekund (hygienická dezinfekce) nebo vtírejte po dobu 3 minuty (chirurgická dezinfekce).	Před každým výkonem a po každém výkonu.	
	Mytí rukou.	Velodes® Soap	Vlažnou tekoucí vodou pečlivě opláchněte napěněné mýdlo z rukou. Otřete jednorázovým papírovým ubrouskem.	V případě potřeby.	
	 mytí rukou a péče o pokožku	Péče o pokožku rukou.	Velodes® Cream	Malé množství krému naneste na čistou, suchou pokožku rukou a rozetřete.	Po každém mytí rukou.