



DENTAL DIRECT®

KOMPLETNÍ HYGIENICKÉ ŘEŠENÍ





DENTAL DIRECT®

PRIVAT LABEL DESINFEKCE PŘEDNÍ EVROPSKÝ VÝROBCE VYSOKÁ ÚČINNOST BEZKONKURENČNÍ CENA

I DIRECT WIPES NA

DIRECT WIPES NA - bezalkoholové vlhčené ubrousky pro dezinfekci otěrem u citlivých ploch a medicínského vybavení. Doporučuje se zejména pro dezinfekci neinvazivních zdravotnických prostředků z plastu, akrylátového skla, nerezové oceli, kovu, hliníku, pryže a porcelánu. Mohou být použity v jednotce intenzivní péče a operačním sále, pro dezinfekci zdravotnického zařízení, rehabilitačních zařízení, křesel, inkubátorů, hlavíc USG a lamp určených pro léčbu. Neobsahují aldehydy a fosfáty, díky nimž nepřebarvují dezinfikované povrchy. Mají příjemnou vůni.

Návod k použití: Vyměte ubrousek z obalu a utřete s ním dezinfikovaný povrch. Opatrně uzavřete víko plechovky. Po otevření spotřebujte do 30 dnů. Nepoužívejte, pokud je ubrousek suchý. Povrch nevyžaduje oplachování vodou. V případě obzvláště citlivých povrchů se doporučuje testovat na neviditelném místě. Výrobek je určen pro použití profesionálním uživatelem.



I DIRECT FOAM EXTRA

DIRECT FOAM EXTRA - 1L, 5L bezalkoholový prostředek určený pro postříkovou dezinfekci citlivých ploch a medicínského vybavení. Pěna může být použita na jednotkách intenzivní péče a operačních sálech, pro dezinfekci zdravotnického zařízení, rehabilitačního vybavení, křesel, inkubátorů a lamp. Neobsahuje aldehydy a fosforečnany, takže nedochází k odbarvení dezinfikovaných povrchů. Má příjemnou vůni. Produkt má kladné stanovisko „Centrum Zdrowia Dziecka nr 43 / DKJ / 2016“.

Návod k použití: Výrobek je opatřen dvojitou koncovkou pro sprej a pěnu. Doporučuje se rozptýlit produkt ve formě pěny. Nastříkejte na povrch ze vzdálenosti 20-30 cm, což zajistí plné pokrytí. Odstraňte přebytek přípravku, například pomocí jednorázové utěrky. Povrch nevyžaduje oplachování vodou. Pro dezinfekci obzvláště jemných povrchů (např. přírodní kůže) se doporučuje provést test na neviditelném místě. Výrobek určený pro použití profesionálním uživatelem.



I DIRECT SPRAY SL

DIRECT SPRAY SL - 1L, 5L prostředek k okamžitému použití určený pro postříkovou dezinfekci ploch a neinvazivního medicínského vybavení a neinvazivních zdravotnických prostředků. Je vhodný například na vyšetřovací lehátka, operační křesla, zdravotnické nástroje, neinvazivní operační nástroje, nástroje pro rehabilitaci a jiné těžko dostupné povrchy zdravotnických prostředků. Doporučujeme hlavně pro skleněné a lesklé povrchy neinvazivních zdravotnických prostředků. Přípravek může být použit pro zdravotnické prostředky v těsném kontaktu s potravinami. Doporučuje se také pro dezinfekci stomatologických koncovek před sterilizačním procesem, stejně jako protetických lžic a silikonových otisků. Produkt neobsahuje aldehydy a fenoly.

Návod k použití: Aplikujte přípravek na povrch ze vzdálenosti asi 30 cm a dejte na jeho úplné pokrytí. Ponechte ho po celou dobu účinku přípravku. Po zaschnutí na povrchu nezanechává pruhy. Nepoužívejte na povrchy citlivé na alkohol (např. akrylové sklo). Výrobek určený pro použití profesionálním uživatelem.



I DIRECT DES SOAP SL

DIRECT DES SOAP SL - 5L emulze na mytí rukou, pokožky hlavy a celého těla. Emulze neobsahuje mýdlo, takže může být použita u osob s alergií a nesnášenlivostí na výrobky na bázi mýdla. Vzhledem k obsahu prostředků pro péči je doporučeno zejména pro lékaře, který je v důsledku častého mytí vystaven působení macerace pokožky. Emulze se také doporučuje pro mytí pacientů s otlakami.

pH 5,5-6,5



Návod k použití:

Mytí rukou: Naneste malé množství emulze na zvlhčené ruce. Po vytvoření jemné pěny opláchněte vodou.

Mytí ve sprše: Aplikujte emulzi na zvlhčenou pokožku a vlasy. Umyjte tělo a opláchněte pod tekoucí vodou.

Mytí ve vaně: Nalijte emulzi do vany naplněné vodou. Umyjte kůži a vlasy a opláchněte je pod tekoucí vodou.



I DIRECT FORTE SL

DIRECT FORTE SL - 1L, 5L koncentrát určený pro čištění a dezinfekci chirurgických nástrojů.

Má velmi dobré čisticí vlastnosti a široké spektrum účinku v krátkém čase. Je určen pro ruční dezinfekci nástrojů a dezinfekci v ultrazvukových čistíčkách. Výrobek má antikoroziní vlastnosti. Lze ho použít na široké spektrum druhů materiálů. Doporučuje se pro přístroje z nerezové oceli, niklu, mědi, hliníku, pryže, porcelánu, skla a plastu.

Návod k použití: Připravte roztok správným ředěním koncentrátu s vodou. Výběr koncentrace závisí na požadovaném spektru a době trvání účinku. Aby byla dosažena koncentrace 1%, 10 ml koncentrátu by mělo být rozpuštěno v 990 ml vody. Nástroje okamžitě ponořte do roztoku. Všechny části a otvory musí být zcela naplněny roztokem. Po dezinfekci nástroje opláchněte a osušte. Aktivita nekontaminovaného pracovního roztoku je 14 dní. Z hygienických důvodů se doporučuje denně vyměnit roztok. Nekombinujte s jinými čisticími nebo dezinfekčními prostředky. Výrobek určený pro použití profesionálním uživatelem.



I DIRECT BOHR SL

DIRECT BOHR SL - 1L, 5L prostředek k okamžitému použití určený pro čištění a dezinfekci rotačních nástrojů.

Obsahuje inhibitor koroze, díky kterému dokonale chrání nástroje vyrobené z oceli a kovových slitin. Má velmi dobré mycí vlastnosti, a to i v případě suchých organických zbytků. Lze jej použít ponořením do dezinfekční lázně nebo do ultrazvukové lázně.

Návod k použití: Ihned po použití ponořte nástroje do neředěného přípravku. Pečlivě ponořte všechny části. Po určené době vyjměte nástroje z vany nebo podložky, opláchněte vodou a osušte. V případě viditelného znečištění odstraňte štetcem a dezinfikovaný výrobek opět ponořte do přípravku. Po vysušení vyčištěné nástroje sterilizujte. Nekombinujte s jinými čisticími nebo dezinfekčními prostředky. Výrobek určený pro použití profesionálním uživatelem.



I DIRECT UNIT NF








DIRECT UNIT NF - 5L koncentrát určený pro čištění a dezinfekci odsávacích zařízení. Direct Unit NF je určen pro současné mytí a dezinfekci odsávacích systémů, separátorů amalgámu a plivátka zubní soupravy. Přípravek je nepěňivý. Při každodenním používání zabraňuje tvorbě biofilmů. Může se také použít k dezinfekci uzavřeného okruhu v horkých vanách, které jsou zdravotnickými zařízeními. Výrobek je určen pro použití profesionálním uživatelem.

Návod k použití: Koncentrát je třeba zředit vodou. Aby bylo dosaženo koncentrace 2%, 20 ml koncentrátu by mělo být rozpuštěno v 980 ml vody. Nechte odsát požadované množství připraveného roztoku dle návodu instrukcí výrobce zubní soupravy.



DESINFEKČNÍ PLÁN

V ZUBNÍCH A LÉKAŘSKÝCH ORDINACÍCH

	CO?	ČÍM?	JAK?	KDY?	KDO?	
 plochy a povrchy	Čištění a dezinfekce povrchů citlivých na alkohol.	Direct Foam Extra Direct Wipes NA	Nastříkejte na celý povrch, počkejte 5 minut. V případě potřeby setřete suchým hadříkem nebo otřete ubrouskem Direct Wipes NA a nechte uschnout.	V případě potřeby.		
	 lékařské zařízení	Mytí a postřiková dezinfekce neinvazivního zdravotnického vybavení, např. zubních souprav, nábytku.	Direct Wipes NA Direct Spray SL	Nastříkejte/setřete povrch a počkejte 30 sekund nebo do úplného uschnutí.	Před a po každém použití, v případě kontaminace nebo v případě potřeby.	
		Čištění a dezinfekce stomatologických násadců	Direct Spray SL Direct Wipes NA	Nastříkejte/setřete povrch a počkejte 30 sekund nebo do úplného uschnutí.	Okamžitě po použití.	
 dentální koncovky						
 odsávací zařízení	Čištění a dezinfekce odsávacích zařízení, hadic, separátorů amalgámu a plivátka zubní soupravy.	Direct Unit NF	Nalijte do plivátka, nasajte savkami, nechte působit. Propláchněte vodou.	Pokud možno po každém použití, kdy bylo odsáváno (obzvláště krev). Na konci každého pracovního dne.		
 chirurgické nástroje	Čištění a dezinfekce chirurgického a rotačního instrumentária	Direct Forte SL	0,5% = 30 minut (5 ml na 995 ml vody). Poté do roztoku ponořte nástroje na 30 minut. Opláchněte čistou vodou.	Okamžitě po použití.		
	 rotační nástroje	Čištění a dezinfekce rotačního instrumentária	Direct Bohr SL	Ponořte na 15 minut do produktu připraveného k použití. Poté opláchněte, vysušte a sterilizujte.	Okamžitě po použití.	
 mytí rukou	Mytí rukou.	Direct Des Soap SL	Vlažnou tekoucí vodou pečlivě opláchnout napěněné mýdlo z rukou. Otřít jednorázovým papírovým ubrouskem.	V případě potřeby.		



K DESINFEKČNÍM ZDARMA DODÁME KOMPLETNÍ SLOŽKU DOKUMENTŮ PRO HYGIENICKOU STANICI ČI SÚKL A DESINFEKČNÍ PLÁN.

Distribuce v ČR:

JANDA-DENTAL

JANDA-DENTAL a.s.
Březinova 1739, 440 01 Louny

tel.: +420 415 653 201
tel.: +420 775 228 764

info@janda-dental.cz
www.janda-dental.cz



DENTAL DIRECT®