



	CO?	ČÍM?	JAK?	KDY?	KDO?
 plochy a povrchy	Čištění a dezinfekce povrchů citlivých na alkohol.	Velox® Foam Extra Velox® Wipes NA	Nastříkejte na celý povrch, počkejte 5 minut. V případě potřeby setřete suchým hadříkem nebo otřete ubrouskem Direct Wipes NA a nechte uschnout.	V případě kontaminace nebo v případě potřeby.	
	Mytí a postřiková dezinfekce neinvazivního zdravotnického vybavení, např. zubních souprav, nábytku.	Velox® Spray Velox® Wipes Velox® Duo Wipes Velox® Wipes NA	Nastříkejte / setřete povrch a počkejte 30 sekund nebo do úplného uschnutí. Vždy postupujte podle příbalového letáku daného přípravku.	Před a po každém použití, v případě kontaminace nebo v případě potřeby.	
	Suché utěrky v dóze pro kombinaci s koncentráty či připravenými roztoky.	Medisept Dry Wipes	Dle použitého dezinfekčního přípravku.	Před a po každém použití, v případě kontaminace nebo v případě potřeby.	
	Čištění a dezinfekce stomatologických nástrojů.	Velox® Spray Velox® Wipes Velox® Duo Wipes Velox® Wipes NA	Nastříkejte / setřete povrch a počkejte 30 sekund nebo do úplného uschnutí. Vždy postupujte podle příbalového letáku daného přípravku.	Okamžitě po použití.	
 velké plochy	Mytí a dezinfekce velkých voděodolných zdravotnických ploch a povrchů.	Quatroles® Extra	0,5% = 15 minut. (5 ml na 995 ml vody).	Na konci každého pracovního dne nebo v případě potřeby.	
 zubní soupravy a sací zařízení	Čištění a dezinfekce odsávacích zařízení, hadic, separátorů amalgámu a plivátka zubní soupravy.	Quatroles® Unit NF	2% = 15 minut. (20 ml na 980 ml vody). Nalijte do plivátka, nasajte savkami, nechte působit. Propláchněte vodou. Účinný též proti M.terrae - mycobacterium tuberculosis!	Pokud možno po každém použití, kdy bylo odsáváno (obzvláště krev). Na konci každého pracovního dne.	
 chirurgické nástroje	Čištění a dezinfekce chirurgického a rotačního instrumentária. Vhodný též pro dezinfekci dentálních koncovek ponořením.	Viruton® Forte Viruton® Extra	0,5% = 30 minut (5 ml na 995 ml vody). Poté do roztoku ponořte nástroje na 30 minut. Opláchněte čistou vodou. Adeno, Noro viry - 4% = 120 minut (40 ml na 960 ml vody).	Okamžitě po použití. Okamžitě po použití.	
	Čištění a dezinfekce rotačního instrumentária.	Viruton® Bohr	Ponořte na 15 minut do roztoku připraveného k použití. Poté opláchněte, vysušte a sterilizujte.	Okamžitě po použití.	
 dezinfekce rukou	Hygienická a chirurgická dezinfekce rukou.	Velodes® Gel Velodes® Silk	Dostatečné množství gelu naneste na ruce a pečlivě rozetřete. Nechte působit 30 sekund (hygienická dezinfekce) nebo vtírejte po dobu 3 minut (chirurgická dezinfekce).	Před každým výkonem a po každém výkonu.	
	Mytí rukou.	Velodes® Soap Mediclean 420 Scrub	Vlažnou tekoucí vodou pečlivě opláchněte napěněné mýdlo z rukou. Otřete jednorázovým papírovým ubrouskem.	V případě potřeby.	
	Péče o pokožku rukou.	Velodes® Cream	Malé množství krému naneste na čistou, suchou pokožku rukou a rozetřete.	Po každém mytí rukou.	