

# DEPURAL<sup>®</sup> NEO

## Abrazivní pasta

**Výrobce:**

SpofaDental a.s., Markova 238, CZ-506 46 Jičín, www.spofadental.com

**Složení:**

karboxymethylcelulosa, mefelin, hydrogenfosforečnan vápenatý, glycerin, destilovaná voda, chuťové přísady

**Charakteristika:**

DEPURAL<sup>®</sup> NEO je čistící a lešticí pasta bez obsahu fluoru.

**Indikace:**

Mírně abrazivní pasta DEPURAL<sup>®</sup> NEO je určena k profesionálnímu čištění zubů ve stomatologické ordinaci. Používá se k dočištění a leštění povrchu zubů po profylaktickém i terapeutickém odstranění zubního kamene, k odstranění zubního plaku a pigmentací před konzervačním ošetřením zubu nebo před ordinačním nebo řízeným bělením zubů.

**Kontraindikace:**

Pasta DEPURAL<sup>®</sup> NEO se nesmí používat v případě známé alergie na některou složku přípravku. Přípravek není určen pro pravidelnou běžnou ústní hygienu.

**Návod k použití:**

Potřebné množství čistící pasty vytlačte z tuby na vhodnou podložku a odtud naberte do rotačního kartáčku nebo profylaktického gumového kalíšku. Vlhký povrch zubů čistěte pod mírným tlakem při nízkých otáčkách, směr rotace nástroje měňte dle potřeby. Dostatečné chlazení rotačního nástroje zajišťuje potřebné množství čistící pasty. Odplavování pasty během ošetření zajistíte použitím savky.

**Varování:**

DEPURAL<sup>®</sup> NEO obsahuje abraziva a aromatické látky, které mohou způsobit podráždění v případě náhodného vniknutí do oka. Při postižení očí vypláchněte velkým množstvím tekoucí vody a při přetrvávajících obtížích vyhledejte odbornou lékařskou pomoc.

**Upozornění:**

Při práci používejte ochranné pomůcky – brýle. Pacienta chraňte rouškou před potřísněním.

**Zneškodnění odpadu:**

Prázdný obal a nepoužitý zbytek materiálu likvidujte společně s běžným odpadem vznikajícím na pracovišti.

**Skladování:**

V suchu a temnu, při teplotě od 5 do 25 °C, v dobře uzavřeném obalu.

**Doba použitelnosti:**

2 roky

**Balení:**

75 g pasty v PE tubě

Datum poslední revize: 25. 3. 2005

