

MD-ChelCream

EDTA Gel (čištění kořenových kanálků, odstranění smear layer, preparace)

Rozsah použití:

- Preparace kořenových kanálků kořenovými nástroji
- Při obliterovaných kanálkách
- U velmi úzkých kanálků v distálním úseku
- Odstranění vrstvy smear layer z kanálku

Efekt použití:

- Odstranění anorganických substancí chelatací (EDTA-Ca²⁺)
- Jednodušší plnění kanálků díky jejich lubrikaci
- Vytvoření čisté stěny k.k. po odstranění vrstvy smear layer

Způsob použití:

- Naneste malé množství gelu do ústí kořenového kanálku pomocí přibalené kanyly
- Opatrně zaveďte gel ručním nástrojem (K-File, K-Reamer) dovnitř kanálku
- Pokud je pro preparaci nezbytně nutné, opakujte nanesení gelu do úplného opracování kořenového kanálku
- Vypláchněte zbytek gelu z kořenového kanálku roztokem natrium hypochloridu.

Upozornění:

- Používejte EDTA Gel pro eliminaci perforace kořenových kanálků
- Zamezte protlačení roztoku přes apex
- Po použití uchovávejte stříkačku vždy uzavřenou
- Uchovávejte mimo dosah dětí

Expirace:

- 2 roky od data výroby - vyznačené na obalu
- Výrobek je schválen pro prodej v zemích EU – CE-Certificate for MD, Annex II Directive for MD 93/42/EEC

Výrobce:

META BIOMED Co., Ltd.

414-12, Mochoong-Dong, Cheongju City
Choong Chong Buk-Do 361-140, Korea

Distributor:

JANDA-DENTAL a.s.

Březinova 1739, 440 01 Louny

Tel.: 415 653 201

Fax: 415 655 773

E-mail: info@janda-dental.cz