

MD-Cleanser

17% EDTA roztok pro čištění kořenových kanálků, odstranění smear layer

Rozsah použití:

- Preparace kořenových kanálků kořenovými nástroji
- Při obliterovaných kanálcích
- U velmi úzkých kanálků v distálním úseku
- Odstranění vrstvy smear layer z kanálku

Způsob použití při biomechanickém opracování kořenových kanálků:

- Naneste přiloženou stříkačkou pár kapek MD Cleanser roztoku do kořenového kanálku
- Opatrně zaveďte roztok ručním nástrojem (K-File, K-Reamer) dovnitř kanálku
- Pokud je pro preparaci nezbytně nutné, opakujte nanesení roztoku do úplného opracování kořenového kanálku
- Vypláchněte zbytek gelu z kořenového kanálku roztokem natrium hypochloridu.

Způsob použití při odstranění vrstvy smear layer:

- Aplikujte MD-Cleanser přiloženou stříkačkou do kořenového kanálku
- Bezprostředně poté vypláchněte důkladně kanálek roztokem natrium hypochloridu dokud nedojde k úplnému vypláchnutí MD-Cleanser z kanálku
- Vysajte zbytek tekutiny z kanálku a poté jej důkladně vysušte

Upozornění:

- Používejte MD-Cleanser pro eliminaci perforace kořenových kanálků
- Zamezte protlačení roztoku přes apex
- Po použití uchovávejte lahvičku vždy uzavřenou
- Uchovávejte mimo dosah dětí

Způsob skladování a expirace:

- Skladovat při teplotě od 10°C do 25°C
- Expirace 2 roky od data výroby – vyznačené na obalu
- Výrobek je schválen pro prodej v zemích EU – CE-Certificate for MD, Annex II Directive for MD 93/42/EEC

Výrobce:

META BIOMED Co., Ltd.

414-12, Mochoong-Dong, Cheongju City
Choong Chong Buk-Do 361-140, Korea

Distributor:

JANDA-DENTAL a.s.

Březinova 1739, 440 01 Louny

Tel.: 415 653 201

Fax: 415 655 773

E-mail: info@janda-dental.cz