

META ETCHANT

Leptací gel

Meta Etchant obsahuje 37% kyseliny fosforečné

Charakteristika:

Meta Etchant je gel pro naleptání skloviny a dentinu před:

- aplikací výplní
- přímou kompozitní dostavbou
- adhezivní cementování inlayí, korunek, můstků
- adhezivní můstky
- aplikací ortodontických zámků

Způsob použití:

Meta Etchant se dodává ve stříkačkách k okamžitému použití. Doporučujeme použití kofferdamu pro izolaci okolních tkání

Aplikujte Meta Etchant gel na požadované plochy (dentin/sklovina) na dobu 15 sekund. Poté odstraňte gel, vypláchněte po dobu 20 sekund a vysušte do sucha.

Vedlejší účinky:

Nejsou doposud známy.

Varování:

Meta Etchant je žíravina! Obsahuje kyselinu forforečnou, která může poleptat. Doporučujeme používat ochranné pomůcky (zvláště ochranu očí) při práci s tímto přípravkem. Zamezte kontaktu přípravku s okem, pokožkou nebo měkkými tkáněmi. Při zasažení očí je okamžitě vypláchněte vodou a poraďte se s lékařem.

Upozornění:

- Nepoužívejte Meta Etchant u osob s alergiemi na složky tohoto materiálu
- Výhradně pro použití ve stomatologii
- Uchovávejte mimo dosah dětí

Způsob skladování a expirace:

- Skladujte při teplotě od 18°C do 24°C
- Expirace 2 roky od data výroby – vyznačené na obalu
- Nepoužívejte po datu expirace
- Uschovávání v lednici prodlouží dobu trvanlivosti
- Výrobek je schválen pro prodej v zemích EU – CE-Certificate for MD, Annex II Directive for MD 93/42/EEC

Výrobce:

META BIOMED Co., Ltd.

414-12, Mochoong-Dong, Cheongju City
Choong Chong Buk-Do 361-140, Korea

Distributor:

JANDA-DENTAL a.s.

Březinova 1739, 440 01 Louny
Tel.: 415 653 201
Fax: 415 655 773
E-mail: info@janda-dental.cz