

META P&BOND

Meta P&Bond je světlem tuhnoucí jednosložkové, jednokrokové adhezivum.

Charakteristika:

Meta P&Bond je indikován jako adhezivum pro:

- přímé kompozitní dostavby
- keramiku, kompozita, opravy kovů
- aplikaci amalgámu, čepů
- keramické fasety
- nepřímé adhezivum u Metacem® duálně tuhnoucího dostavbového cementu

Způsob použití:

Meta P&Bond se dodává v lahvičce k okamžitému použití. Doporučujeme použití kofferdamu pro izolaci okolních tkání.

1/ Po preparaci naleptejte místo aplikace leptacím gelem Meta Etchant 37% po dobu 15 sekund.

2/ Odstraňte gel, vypláchněte po dobu 20 sekund a vysušte do sucha. Neleštěte.

3/ Přiloženým štětečkem aplikujte dvojím nátěrem adhezivum Meta P&Bond. Ofoukněte vzduchem po dobu 5 sekund a osvětlete světlem po dobu 10 sekund.

Kontraindikace:

Nepoužívejte při známé precitlivělosti na složky tohoto materiálu.

Vedlejší účinky:

Nejsou doposud známy.

Upozornění:

- Zamezte kontaktu Meta P&Bond přípravku s kůží, sliznicí nebo okem.
- Nezpolymerizovaný Meta P&Bond může způsobit lehké, ale reversibilní podráždění nebo může vést k celkové citlivosti na metakryláty
- Výhradně pro použití ve stomatologii
- Uchovávejte mimo dosah dětí

Způsob skladování a expirace:

- Uzavřete důkladně lahvičku bezprostředně po použití. Zamezíte tak odpařování.
- Skladujte při teplotě od 2°C do 28°C
- Expirace 2 roky od data výroby – vyznačené na obalu
- Nepoužívejte po datu expirace
- Uschovávání v ledničce prodlouží dobu trvanlivosti
- Výrobek je schválen pro prodej v zemích EU – CE-Certificate for MD, Annex II Directive for MD 93/42/EEC

Výrobce:

META BIOMED Co., Ltd.

414-12, Mochoong-Dong, Cheongju City
Choong Chong Buk-Do 361-140, Korea

Distributor:

JANDA-DENTAL a.s.

Březinova 1739, 440 01 Louny
Tel.: 415 653 201
Fax: 415 655 773
E-mail: info@janda-dental.cz