

## NÁVOD K POUŽITÍ

# Opalescence 6%

● ● ● go<sup>®</sup>

### System pro bělení zubů



'U' • horní bělicí nosič

'L' • dolní bělicí nosič

Výrobek musí být skladován v chladničce. Před použitím nechte produkt ohřát na pokojovou teplotu. Nosič snadněji přilne k zubům.

**Vyjměte z obalu.**



**Vycentrujte nosič na zubní oblouk.**



**Jemně přisajte nosič na zuby nebo polkněte.**



**Sundejte vnější nosič**



**Jemně přisajte nosič na zuby nebo polkněte.**

**Noste 60-90 minut/ den. Po ukončení aplikace sundejte nosič a vyčistěte zuby kartáčkem.**

### **Popis:**

Opalescence® Go je systém profesionálního domácího bělení v pohodlných předplněných jednorázových nosičích na předpis a pod dohledem stomatologa. Je to čirý lepkavý gel s příchutí o vysoké viskozitě, s 6% peroxidu vodíku, s dusičnanem draselným a fluoridem sodným.

- nový nosič UltraFit se lépe adaptuje na zubní oblouk a zajistí pohodlnější bělení
- unikátní materiál nosiče nabízí extrémně pohodlné nasazení a snadno se přizpůsobí zubům jakéhokoli pacienta
- pokrytí od moláru k moláru zajistí kontakt gelu i se zuby v distálním úseku
- skvělá přizpůsobivost nosiče UltraFit zajistí během bělení kontakt maximálního množství gelu se zuby

### **Opatření pro Evropu:**

1. Nesmí být použito pro pacienty mladší 18 let.
2. Prodej bělicích gelů je možný pouze zubním lékařům. První aplikace každého bělicího cyklu bude provedena pouze stomatologem nebo pod jeho přímým dohledem, bude-li zaručena ekvivalentní úroveň bezpečnosti. Poté bude bělicí materiál poskytnut uživateli k dokončení cyklu.
3. Obsahuje fluorid sodný.
4. Prosíme, berte na vědomí datum expirace vyznačené na vnějším obale/ stříkačce.

### **Upozornění:**


1. Uchovávejte přípravky k bělení zubů mimo dosah dětí.
2. Před bělením doporučujeme vyšetření u zubního lékaře. Některé diskolorace mohou vyžadovat jiné stomatologické ošetření než bělení. Porcelánové korunky, fazety a bílé výplně bělením nezesvětlí.
3. Určeno pouze pro pacienty se zdravými dásněmi. Pokud je použito u jedinců s onemocněním parodontu, může dojít k podráždění dásní.
4. **Tento produkt NENÍ určen na noční bělení.**
5. Občas se některé části zubů mohou bělit rychleji nebo nestejně oproti jiným. Výsledky mohou být různé. U asi 5% populace mohou být zuby k bělení rezistentní. Bělení zubů s velkými kovovými výplněmi může vést k prosvítání kovu přes zuby.

6. Kyselé potraviny/ nápoje mohou způsobit citlivost zubů, jestliže je konzumujete krátce po bělení.
7. Při bělení nekuřte nebo nejezte.
8. Přípravek není určen pro těhotné ženy.
9. Skladujte bělicí přípravky mimo sluneční světlo a teplo. Nezmrazujte.
10. Nepolykejte gel nebo oplachovaný gel. Výrobek obsahuje peroxid vodíku a může obsahovat fluorid; polknutí velkého množství může být škodlivé.
11. Materiál by měl být skladován v chladničce (2-8°C), aby byla zaručena jeho životnost.
12. Vyhněte se kontaktu s očima.

**UPOZORNĚNÍ:** U některých uživatelů se může objevit citlivost. Většinou bývá mírná a přechodná, ale v některých případech může vyžadovat ošetření stomatologem. Jestliže máte výrazný pocit nepohodlí, přerušte používání tohoto výrobku a konzultujte stav se stomatologem. Máte-li jakékoli dotazy ohledně tohoto produktu nebo ošetření, prosíme, konzultujte je s vaším ošetřujícím stomatologem. Nepoužívejte nosič opakovaně – zabraňte křížové kontaminaci.

Legenda:

není určeno pro injekce

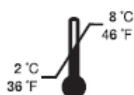

doporučena teplota skladování (2-8



uchovávejte mimo dosah dětí

dávkování určí stomatolog  
po použití zničte



uchovávat mimo dosah tepla  
a slunečního záření



zdravotní riziko

**R<sub>x</sub>**

**Pouze pro profesionální použití.**



viz instrukce



datum minimální trvanlivosti



nepoužívat opakovaně-vyhněte se křížové kontaminaci

**LOT**

šarže

**REF**

katalogové číslo

**Mátová příchut' – složení:**


Glycerín, voda (aqua), urea -(karbamid) peroxid močoviny, karbomer, peroxid vodíku, silica, PVP, Xylitol, hydroxid sodný, fosforečnan sodný, kyselina citronová, EDTA, příchut' (aroma), dusičnan draselný, fluorid sodný, sukralóza,

**Melounová příchut' – složení:**

Glycerín, voda (aqua), urea- (karbamid) peroxid močoviny, karbomer, peroxid vodíku, hydroxid sodný, silica, PVP, Xylitol, příchut' (aróma), hydroxid sodný, fosforečnan sodný, dusičnan draselný, sukralóza, fluorid sodný, kyselina citronová, EDTA,



R<sub>x</sub>

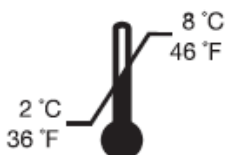

skladujte v chladu

Ultradent Products GmbH  
Am Westhover Berg 30  
51149 Cologne  
Germany

**ULTRADENT**  
PRODUCTS, INC.

For an SDS of this product, please see: [www.ultradent.com](http://www.ultradent.com)

© Copyright 2015 Ultradent Products, Inc. All Rights Reserved. Made in USA

Manufactured by Ultradent Products, Inc. 505 West 10200 South, South Jordan, Utah 84095

040215 68581.4

Revize: 04-2016