



Návod k používání a skladování ochranných zástěr a límců RADPROM pro stomatologii

Účel použití:

Ochrana pacientů proti ionizujícímu záření při rentgenovém vyšetření. Intraorální zástěry a límce pro intraorální snímkování, panoramatické zástěry pro panoramatické a 3D/CBCT snímkování .

Výrobce:

VMK-RTG s.r.o., Ovinecká 99/45, 170 00 Praha 7, IČ 24294021.

Stručný popis:

Ochranné zástěry a límce RADPROM jsou klasifikovány jako osobní ochranné prostředky kategorie III. Jsou vyráběny ve shodě s normou ČSN EN 61331-3:2014, proces výroby podléhá certifikovanému systému řízení kvality podle ČSN EN ISO 9001:2016. Na výrobky RADPROM byl vydán certifikát o ES přezkoušení typu.

Stínící vrstva je z lehkého stínícího materiálu s obsahem olova, se stínícím ekvivalentem 0,35 nebo 0,50 mm Pb. Vrchový materiál je polyesterová tkanina nebo umělá kůže. Barva ani tloušťka vrchového materiálu nemá vliv na účinnost ochranného oděvu. Životnost ochranných oděvů závisí na dodržování doporučených zásad používání, čištění a skladování.

Používání:

Při používání ochranných oděvů se vyvarujte kontaktu oděvu s ostrými předměty, které by mohly oděv proříznout či propíchnout a tím jej trvale znehodnotit.

Před každým použitím ochranných oděvů zkontrolujte, zda není ochranný oděv poškozen. Znaky poškození stínícího materiálu ochranných prostředků jsou prolomeniny s trhlinami, praskliny a místa s nerovnostmi. Jedině po provedení pečlivé kontroly ochranných oděvů je možné zaručit optimální ochranu před zářením.

V případě jakýchkoli pochybností o integritě stínící vrstvy se obraťte na svého dodavatele nebo výrobce ochranného oděvu. Ochranný oděv, u kterého je poškozen stínící materiál, již není dále vhodný pro ochranu před zářením a je určen k likvidaci v souladu s platnou odpadovou legislativou. Oděvy mají upínání na suchý zip. Vyvarujte se kontaktu hrubé části suchého zipu s materiály pouštějícími vlákna, jako je vata, vlna, fleecce a podobně, prodloužíte tím životnost upínání. Zachycená textilní vlákna lze ze suchého zipu částečně odstranit kartáčem.

Skladování:

Pro uložení ochranných oděvů RADPROM je vhodné použít závěsný systém – věšák ramínkového typu. V žádném případě nesmí být ochranné oděvy přehozeny přes ostré hrany, např. přes opěradlo židle, nebo překládány, mohlo by dojít k poškození stínícího materiálu. Ochranné oděvy nesmí být uloženy v blízkosti tepelného zdroje.

Čištění:

Čerstvé skvrny a prach doporučujeme čistit jemným hadříkem navlhčeným vlažnou vodou, případně mýdlovým roztokem, a umyté místo následně vytřít do sucha. K dezinfekci ochranných oděvů lze použít většinu běžných dezinfekčních prostředků. Před použitím na větší ploše doporučujeme vyzkoušet prostředek na menší části oděvu, zda nezpůsobuje změnu barevnosti vrchového materiálu.

Nikdy nestříkejte či nenalévejte dezinfekční nebo čistící prostředek přímo na ochranný oděv, ani oděv nenamáčejte do kapaliny – vždy prostředek naneste na hadřík, kterým ochranný oděv otřete. Po použití dezinfekčního prostředku je třeba oděv otřít hadříkem navlhčeným vodou a následně oděv vytřít do sucha.

K čištění ochranných oděvů nikdy nepoužívejte látky, které obsahují benzín, ředidla, organická rozpouštědla, leštidla a abrazivní prostředky.

Záruka a servis:

Výrobce poskytuje na ochranné oděvy RADPROM záruku 2 roky. Záruka se nevztahuje na mechanické a chemické poškození. V případě zájmu o výměnu vrchového materiálu nebo v případě nefunkčnosti suchých zipů, rychloupínacích spon apod. kontaktujte svého dodavatele nebo výrobce oděvu.

Přeprava, balení:

Ochranné oděvy RADPROM jsou distribuovány smotané (zástěry), případně volně uložené (límce) v kartonové krabici (zástěry, límce v setu se zástěrou) nebo obálce (samostatné límce). Při otvírání obalů nepoužívejte ostré nástroje a dbejte na to, abyste nepoškodili oděv. Ochranné oděvy nesmí být v žádném případě přepravovány či skladovány přehnuté nebo přeložené. Při přepravě nebo dlouhodobém skladování doporučujeme ochranný oděv opatrně srolovat a zabalit do pevné krabice přiměřené velikosti.

Značení:

Na vnitřní straně ochranných oděvů RADPROM je všitá textilní etiketa, která obsahuje na líci jméno a adresu výrobce, odpovídající velikost, stínící ekvivalent, napětí rentgenky použité pro jeho stanovení, odkaz na normu ČSN EN 61331-3:2014. Na rubu potom název výrobku, datum výroby a výrobní číslo. Příslušná velikost a hodnota ekvivalentu jsou na etiketě zakroužkované, datum výroby a výrobní číslo jsou označeny razítkem. Výrobek je označen evropskou značkou shody CE s čtyřmístným číslem notifikované osoby.

Tento návod je autorizován výrobcem a nesmí být bez jeho souhlasu doplňován ani pozměňován. Výrobce si vyhrazuje právo tento návod kdykoli aktualizovat.

Datum poslední revize: 15. 1. 2021.