

NETC

Provizorní fixační cement bez Eugenolu

Aplikace:

Fixace provizorních korunek a můsků

Návod k použití:

- NETC používejte při pokojové teplotě 18°C – 23°C a relativní vlhkosti 45-55%
- Vytlačte z každé tuby na dodávanou podložku stejné množství materiálu
- Smíchejte pečlivě obě složky mísicí špachtlí po dobu 20-30 sekund
- Naneste materiál do provizorní korunky nebo můstku a nasadte na pahýl
- Nechte zatuhnout (4 minuty od počátku míchání) a odstraňte přebytky
- Obě tuby ihned po vytlačení materiálu pečlivě uzavřete – nezaměňte víčka!

Charakteristika:

- Jednoduché namíchání pasta/pasta
- Doba zpracování 1,5 minuty od počátku míchání
- Doba tuhnutí 4 minuty od počátku míchání
- Speciálně vhodný materiál pro pacienty s alergií na eugenol

Upozornění:

- Nepoužívejte NETC u osob s alergiemi na složky tohoto materiálu
- Výhradně pro použití ve stomatologii
- Uchovávejte mimo dosah dětí

Čištění nástrojů:

Nástroje lze okamžitě po použití očistit alkoholem

Vedlejší účinky:

Nejsou známy, velmi zřídka může dojít ke kontaktní alergii

Dodává se:

60g báze (20ml) a 20g katalyzátoru (20ml) v tubách, mísicí podložka

Způsob skladování a expirace:

- Obě tuby ihned po použití vždy důkladně uzavřete (dbejte, aby nedošlo k záměně víček)
- Skladujte při teplotě od 4°C do 25°C
- Chraňte před přímým slunečním zářením (UV zářením)
- Expirace 2 roky od data výroby – vyznačené na obalu
- Nepoužívejte po datu expirace
- Výrobek je schválen pro prodej v zemích EU – CE-Certificate for MD, Annex II Directive for MD 93/42/EEC

Výrobce:

META BIOMED Co., Ltd.

414-12, Mochoong-Dong, Cheongju City
Choong Chong Buk-Do 361-140, Korea

Distributor:

JANDA-DENTAL a.s.

Březinova 1739, 440 01 Louny
Tel.: 415 653 201
Fax: 415 655 773
E-mail: info@janda-dental.cz