

Návod k použití:

NUPRO PROPHYLAXS PASTE

Leštící pasta

UPOZORNĚNÍ

Pouze pro použití ve stomatologii.

Tato informace se týká následujících balení produktu:

200 individuálních 2g kalíšků * nebo

100 individuálních 2g kalíšků (Variety Pack) nebo

340g kelímek

*(kalíšky s jemnou pastou váží 1,9g)

- **Jemná pasta – kalíšky**

Orange (pomerančová)

- **Střední – kalíšky**

Mint (mátová)

- **Hrubá – kalíšky**

Mint (mátová)

- **Plus - kalíšky**

Mint (mátová)

- **Hrubá – kelímek**

- **Střední – kelímek**

NUPRO je leštící pasta bez fluoru.

Profylaktická pasta NUPRO je k dostání v následujících hrubostech:

F – fine = jemná (žlutá)

Ideální pro mladší pacienty

M – medium = střední (modrá)

Pro vysoký lesk

C – coarse = hrubá (červená)

Pro kuřáky

P – plus (zelená)

INDIKACE

Leštění povrchu zubu .

SLOŽENÍ

Profylaktická pasta NUPRO obsahuje pemzu (s výjimkou velmi jemné), glycerin, křemelinu (velmi jemná), sodnou sůl sacharinu, vodu, křemičitan sodný, aroma, barvivo, pojivo a konzervační látky. Toto složení určuje pastu k použití na leštění zubů během ošetření ve stomatologické praxi.

KONTRAINDIKACE

Pasta NUPRO se nesmí používat u pacientů se známou alergií na jakoukoli její složku.

VAROVÁNÍ

- Pasta NUPRO může dráždit oči. Dojde-li ke kontaminaci očí pastou, vyplachujte je okamžitě dostatečným množstvím vody po dobu 15min. Pokud dráždění přetrvává, zajistěte odbornou lékařskou pomoc.

UPOZORNĚNÍ

- Pasty NUPRO smí používat pouze lékař nebo proškolený zdravotnický personál
- Během používání pasty noste ochranné brýle a rukavice

NÁVOD K POUŽITÍ

Při používání kelímků si potřebné množství pasty oddělte do vhodné nádoby. V individuálních kalíšcích je dostatečné množství pasty k ošetření jednoho pacienta.

Profylaktický kartáček nebo kalíšek naplňte pastou tak, že jej za nízkých otáček vtlačíte do kalíšku s pastou.

Používejte vždy dostatečné množství pasty, aby nedocházelo k přehřívání zubu. Polykání pasty a jejímu přílišnému rozpouštění v ústech zabráníte použitím savky.

SKLADOVÁNÍ

Kelímky po použití ihned uzavřete, aby nedocházelo k vysychání pasty.

Neskladujte při teplotách vyšších než 25°C. Chraňte před přímým slunečním světlem.

VÝROBNÍ ČÍSLO A DATUM EXPIRACE

Nepoužívejte po datu expirace.

Výrobní číslo je vyznačeno v souladu s požadavky na identifikaci produktu.