

T Ölspray - Olejový sprej

Obj. číslo 49965

Dóza 250 ml

Typ přípravku:

Olejový lubrikant pro péči o Sirona koncovky. Je vhodný pro všechny koncovky a také pro nástavce a kolénka.

Návod k použití:

Olejový sprej pro péči o nástavce, uzávěry a koncovky, také pro vzdušné motory. Denně minimálně 2 sekundy stříkejte, zvláště před sterilizací – tak docílíte dlouhé životnosti. Při použití držte dózu kolmo a používejte příslušný adaptér.

Upozornění:

Vysoce hořlavý!

Nádobka je pod tlakem. Chraňte před slunečním zářením a teplotami na 50°C. Po spotřebování neotvírejte pomocí násilí ani nevhazujte do ohně. Nestříkejte proti ohni nebo na hořlavé předměty. Uchovávejte v dostatečné vzdálenosti od zdrojů otevřeného ohně – nekuřte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Výrobce:

Dental-Union GmbH

Gutenbergring 7-9

D-63110 Rodgau

Nieder-Roden

Distributor:

Janda-Dental a.s.

Březinova 1739, 440 01 Louny

Tel.: 415 653 201

E-mail: info@janda-dental.cz

www.janda-dental.cz