

OmniSeal – svářečka sterilizačních fólií

Obj. č. 14204

Všeobecné informace

Svářecí systém pro svaření sterilizačních fólií z papíru/ čiré fólie- nenáročný na údržbu. Snižuje spotřebu předžhaveného vlákna a teflonové pásky. Protože odpadá výměna, je použití přístroje jednoduché a spolehlivé. Mohou být použity papírové/ polypropylenové role pro svařování obalů v délce 100 nebo 200 m.

Dodržujte striktně pokyny a doporučení výrobce týkající se správného použití, bezpečnosti, uchování a skladování.

- rychlé, rovnoměrné svařování (ca 3 sek.) bez prodlevy
- 12 mm široká, až 31 cm dlouhá délka sváru
- pevně nastavené kontaktní tlačítko
- přístroj opticky a zvukově signalizuje konec svářecího procesu
- zcela konstantní, monitorovaná teplota
- energeticky úsporný
- svařování bez prodlevy
- bez nutnosti výměny teflonové pásky a předžhaveného vlákna

Použití

1. Připojte síťový kabel ke konektoru, zkontrolujte, zda napětí vašeho přístroje odpovídá napětí místní elektrické sítě.
2. Zapněte přístroj pomocí tlačítka. Jakmile se rozsvítí zelená LED dioda (cca po 3-5 minutách), přístroj je připraven k použití.
3. Zasuňte roli do držáku. Začátek role se vkládá zadní stranou, mezi lis a lišty, vždy papírovou (pevnější) stranou směrem dolů a plastovou stranou nahoru (přímo pod horní lištu). Rameno vytáhněte směrem k obsluze a opatrně ho stlačte směrem dolů, až uslyšíte cvaknutí.

Upozornění: Příliš silný tlak může způsobit zlomení ramene svářečky. Na tento druh poškození se nevztahuje záruka.

4. Jakmile se rozsvítí LED DIODA červeně, je dokončen proces svařování. Vysuňte lis řezačky a odřízněte sáček, zvedněte rameno a vyjměte balíček.

Upozornění: V případě, že je ovladač lisu řezačky vytažen pomalu, může se papír pomačkat a řez není přesný. Aby byl řez opravdu přesný, stiskněte ovladač rychle. V případě potřeby vysuňte lis řezačky vícekrát.

Upozornění

1. Udržujte plochu svářecí desky vždy čistou. Hromadění nečistot na ploše svářečky snižuje životnost rezistence a izolačního materiálu. Svářečku účinně vyčistíte tak, že ji necháte zcela vychladnout a na čištění použijete mírně navlhčenou utěrku napuštěnou alkoholem.

2. V případě potřeby výměny pojistky použijte pouze pojistku shodnou s originální.
3. Při zabalení přístroje obalte části s řeznou plochou bavlnou nebo gázou, aby nedošlo k porušení balení.
4. Svařené sáčky s nástroji vložte do autoklávu. Zkontrolujte podle pokynů výrobce vašeho autoklávu řazení balíčků a sterilizačních cyklů.
5. Při servisu nebo čištění přístroje odpojte síťový kabel.

Popis částí přístroje

1 Držák role	4 Rameno svářečky	7 Síťový vypínač
2 Nosiče držáku	5 Síťový konektor	8 Indikátor/kontrolka
3 Lis řezačky	6 Pojistka	9 Síťový kabel

Specifikace

TECHNICKÉ ÚDAJE

Frekvence:	50 Hz 50/60 Hz
Výkon:	100 W 100 W
Váha:	7,4 Kg
Svár:	12 mm
Technika sváru:	s konstantní teplotou
Rozměry přístroje:	délka = 550 mm
	hloubka = 460 mm
	výška= 280 mm

Záruka a servis

1. Na výrobek je poskytována záruka po dobu 1 roku, počínaje dnem prodeje.
2. Záruka se nevztahuje na poškození z důvodu neodborné manipulace s přístrojem.

Výrobce:
Dental-Union GmbH
 Gutenbergring 7-9
 D-63110 Rodgau
 Nieder-Roden

Distributor:
Janda-Dental a.s.
 Březinova 1739, 440 01 Louny
 Tel.: 415 653 201
 E-mail: info@janda-dental.cz
www.janda-dental.cz