

OMNISIL A® A – KONTUR 2 x 50 ml+ 12 měsících kanyl

Korekční krém střední konzistence – ideální doplnění k dynamik putty a putty

Omnisil A Kontur (2x50ml, 12 měsících kanyl, světle modrá/šedá)

38974

Typ přípravku:

A-silikonová otiskovací hmota pro metodu přesného otiskování

Dle normy EN ISO 4823

Technické údaje:

	EN ISO 4823 Typ	Barva báze/ katalyzátor	Doba míchání	Min. celková doba opracování *	Min.doba tuhnutí v ústní dutině	Deformace pod tlakem	Obnova po deformaci	Lineární změna objemu	Finální tvrdost
			min:sek	min:sek	min:sek	%	%	%	SHORE A
Putty	Typ 0 velmi vysoká konzistence	žlutá/šedá	00:30	02:00	03:30	<3	>99	<0,3	60±5
Dynamik Putty 380	Typ 0 velmi vysoká konzistence	žlutá/šedá		01:30	02:30	<3	>99	<0,3	65±5
Kontur	Typ 2 střední konzistence	světle modrá/šedá		02:00	03:30	<3	>99	<0,2	55±5

* při 23°C, 50±5% rel. vlhkost

Vyšší teploty zkracují, nižší teploty prodlužují tuto dobu.

Skladování otisku: Skladovat v suchu při pokojové teplotě.

Zhotovení modelu: Forma na otisky by se měla vyplnit nejdříve 15 minut po vyjmutí z úst.

Materiály pro zhotovení modelu: Model může být zhotoven např. z materiálu Omnidanos (třída 3) nebo Omnident Stone Superhartgips (třída 4).

Galvanizace: Formy na otiskování lze poměřit nebo postříbřit v obvyklé galvanizační lázni.

Dezinfekce. Formy na otiskování mohou být čištěny a dezinfikovány např. Omniseptem IMP (DGZMK 3/93 V1.0)

Pokyny pro používání a bezpečnostní pokyny:

Před otevřením zkontrolujte, zda nejsou přípravky poškozeny. Poškozené přípravky nepoužívejte. Nově zhotovené kompozitní výplně, latexové rukavice nebo retrakční roztoky mohou narušit proces vytvrzení A-silikonových materiálů. Přípravky nepolykejte a nejezte. V případě zdravotních potíží po spolknutí přípravku okamžitě vyhledejte lékaře, vzácně může totiž dojít např. k ucpání střev. Nejsou prokázány žádné alergické reakce, přesto nemohou být alergie na tento přípravek vyloučeny. Přípravky

jsou určeny pouze pro použití ve stomatologii.

Skladování: skladujte při teplotě, která není vyšší než 25°C

Expirace: viz tiráž na obalu

Údaje o našich výrobcích jsou podloženy rozsáhlými analýzami měření z výroby, výzkumu a techniky použití. Nepatrné technické změny u výroby přípravků jsou vyhrazeny.

Zpracování, použití a spotřeba námi dodávaných přípravků závisí pouze na zodpovědnosti spotřebitele, v tomto směru totiž nemáme již možnost kontroly. Pokud poskytneme ústní, písemnou nebo jinou formou informace týkající se techniky použití, platí však tyto informace pouze jako nezávazná doporučení, také z hlediska práva třetí strany. Tímto nejste zbaveni povinnosti provádět vlastní zkoušku dodávaných přípravků na jejich schopnost a způsobilost pro zamýšlené účely a metody. Naše ručení je každopádně omezeno na všechny škody na hodnotě námi dodávaného a vámi používaného zboží. Perfektní kvalita našich přípravků je zaručena podle údajů uvedených ve všeobecných obchodních podmínkách.

Vystavení příbalové informace: Rev. 0802_1

Výrobce:
Dental-Union GmbH
Gutenbergring 7-9
D-63110 Rodgau
Nieder-Roden

Distributor:
Janda-Dental a.s.
Březinova 1739, 440 01 Louny
Tel.: 415 653 201
E-mail: info@janda-dental.cz
www.janda-dental.cz