

OMNITEMP C

provizorní dentální cement pro upevnění a uzávěr malých plochých kavit

Balení: stříkačka 5 ml, míchací kanyly Typ 10

Obj. číslo 85272

Návod k použití

Odpovídá normě EN 23107/ISO 3107

OMNITEMP C je lehce opracovatelný cement s obsahem eugenolu s kalciumhydroxidem, který neovlivňuje vytvrzení plnicích a upevňovacích materiálů na bázi plastu. OMNITEMP C obsahuje kalciumhydroxid pro podporu vitality zubu.

Oblast indikace:

OMNITEMP C slouží jako provizorní dentální cement pro upevnění a uzávěr malých plochých kavit.

Indikace:

Čepičku uzávěru 5 ml stříkačky otočte o 90 ° ve směru hodinových ručiček.

Nasadte mísící kanyly Typ 10. Zářezy na stříkačce a na mísících kanylách se musí shodovat. Upevněte mísící kanyly otočením o 90° ve směru hodinových ručiček. Materiál se smíchá při vytlačení do kanyly.

Všechny 5ml stříkačky mají snímatelný píst. Píst lze ze stříkačky snadno sejmout a znovu nasadit. Upevňující hmoty obsažené ve stříkačce nezmění svůj stav. Tak se zabrání kontaminaci ve stříkačce.

Aplikace:

Malou část materiálu OMNITEMP C nanese na dočasné korunky nebo můstky a ty nasadíme na preparovaný zub.

Materiál lze opracovat po dobu cca 1 min.

Doba tuhnutí materiálu OMNITEMP C v ústech je 4-6 min.

Po 3-5 min po aplikaci v ústech lze odstranit přebytek materiálu.

Bezpečnostní opatření:

Při otevření pulpy nebo v případě malé tloušťky zbytkového dentinu doporučujeme použít příslušné prostředky na ochranu pulpy.

OMNITEMP C obsahuje oxid zinku, oxid hořčíku, kalciumhydroxid, mastné kyseliny, modifikovanou pryskyřici, parafinové a rostlinné oleje, **u pacientů s alergií na minimálně jednu uvedenou látku je nutné zvážit riziko použití.**

Použitím desenzibilizujícího prostředku před provizorním upevněním zabráníte citlivosti pahýlů zubu. Zbytky tohoto prostředku je nutné zcela odstranit před definitivním upevněním. NEPOUŽÍVEJTE PŘÍTOM PROSTŘEDKY OBSAHUJÍCÍ EUGENOL!

Na velké ploché kavity a také provizorní dlouhodobé uzávěry doporučujeme aplikovat cement s větší tvrdostí.

Doplňující opatření:

Zbytky materiálu OMNITEMP C lze z korunek lépe odstranit, jestliže budou krátce ošetřeny chladícím sprejem.

Skladování výrobku při teplotě 4°C – 23°C

OMNITEMP C odpovídá normě EN 23107 a ISO 3107.

Druhy přípravků v obchodní síti:

Balení 5 ml stříkačky, mísící kanyly Typ 10

obj. č. 85272

Naše přípravky jsou určeny pro použití ve stomatologii. Pro použití námi dodávaných přípravků poskytujeme naše ústní a/nebo písemná upozornění resp. rady podle našeho nejlepšího vědomí pouze nezávazně. Naše upozornění a/nebo rady vás neomezují v tom, že námi dodávané přípravky vyzkoušíte k zamýšleným účelům použití. Protože dojde k použití našich přípravků bez naší kontroly, je to pouze na Vaši vlastní zodpovědnost. Samozřejmě zaručujeme kvalitu našich přípravků odpovídajících příslušným platným normám stejně jako standardu stanoveného ve všeobecných dodacích a prodejních podmínkách.

Výrobce:

Dental-Union GmbH

Gutenbergring 7-9

D-63110 Rodgau

Nieder-Roden

Distributor:

Janda-Dental a.s.

Březinova 1739, 440 01 Louny

Tel.: 415 653 201

E-mail: info@janda-dental.cz

www.janda-dental.cz