

OMNITEMP KB

Fluorescentní, za studena vytvrzující materiál (pasta/pasta) pro zhotovení provizorních korunek, můstků, inlejí a onlejí. OMNITEMP KB se skládá z báze a katalyzátoru.

Balení: kartuše, 10 ks mísících kanyl

Obj. číslo 85313 A2

Obj. číslo 85424 A3

Návod k použití

Použití:

Kartuši vložte do zásobníku s odpovídajícími písty. Z technických důvodů se před prvním použitím mohou vyskytnout nepatrné rozdíly v obsahu náplně obou kartuší. Proto odstraňte uzávěr kartuše a materiál vytlačujte do té doby, než bude rovnoměrně vytékat z obou výtokových otvorů. Potom nasadte míchací kanylu a zafixujte ji otočením o 90°. Materiál se vytlačí pomocí ruční páky a zároveň promíchá ve správném poměru. Po použití ponechte míchací kanylu připevněnou na kartuši. Teprve bezprostředně před dalším použitím ji vyměňte za novou. Při výměně kanyl zkontrolujte uzávěr kartuše kvůli možnému vytékání materiálu.

Pokyny pro opracování:

Nejdříve vyrovnejte stávající podsekřiviny při preparaci, nepoužívejte přitom cementy s obsahem eugenolu.

V případě, že nelze použít prefabrikované korunky nebo podobné preparáty, je nutné zhotovit otisk.

Otisk zhotovíte vyrovnáním podsekřivin a seříznutím odtokových kanálků. V případě, že by měly být stěny provizoria příliš tenké, zvětšete otisk, zejména odstraňte přepážky v aproximálním prostoru.

Následně otisk očistěte a osušte.

OMNITEMP KB aplikujte přímo do otisku. Otisk nepřepřlňujte.

OMNITEMP KB cca po 1-1,5 min po začátku míchání (asi 0,5 – 1 min po vložení do úst) získá elastickou konzistenci.

Provizorní náhradu nejpozději 1,5 min po začátku míchání vyjměte z úst, snadné vyjmutí je totiž možné pouze během elastické fáze.

Podle přebytku materiálu v ústech lze dodatečně kontrolovat proces tuhnutí. Doba tuhnutí nepoužitých přebytků materiálu (míchací kanyly) **není srovnatelná** s dobou tuhnutí v ústech.

Při pokojové teplotě 23°C a 50% vlhkosti vzduchu platí pro tuhnutí následující časové hodnoty:

min: s	min:s	min:s	min:s	min:s
0:00	0:30	1:0	1:30	4:00
vložení do úst	tuhnutí v ústech	vyjmutí z úst	celkové tuhnutí	další opracování

Z důvodů rozdílných pokojových teplot může dojít k nepatrným časovým odchylkám.

Po cca 2-3 minutách vyjměte provizorní náhradu z formy a vysušte ji (popř. použijte rozpouštědlo např. ethylalkohol). Zpravidla se tak odstraní nízká inhibiční vrstva způsobená vzdušným kyslíkem a další opracování je tak snadnější. Povrch provizorní náhrady by měl být hedvábně matný.

Následně je nutné důkladně zbrousit přebytky materiálu a hrubší místa v gingivální oblasti. Zhotovené provizorní náhrady zafixujte pomocí provizorního cementu bez obsahu eugenolu.

Bezpečnostní opatření a pokyny:

- **OMNITEMP KB** obsahuje Metylakryláty, Aminy, Terpeny, Benzoyl Peroxid, BHT. Při prokázané přecitlivělosti (alergii) na látky obsažené v **OMNITEMP KB** **zvažte riziko použití.**
- Kvůli zabránění citlivosti mohou být zbroušené pahýly zubů před zhotovením provizoria izolovány (fluoridační laky, laky na pahýly apod.)
- Kvůli zabránění zlomení resp. poškození úlomky by neměla být provizorní náhrada příliš zatížena (molární oblast)
- Výplňové materiály kompozitního typu a dostavby čepů by měly být dostatečně izolovány (např. Glycerinem), aby nebyly odstraněny s provizorní náhradou.

- Špatná hygiena či časté používání určitých ústních vod může způsobit odlišné zabarvení (barevnou odchylku).
- Provizorní náhrada může být opracována až po úplném vytvrzení (cca 4 min po začátku míchání).
- Oprava defektních provizorních náhrad:
V případě, že dojde i přes vysokou stabilitu materiálu **OMNITEMPT KB** ke zlomení provizorní náhrady, doporučujeme následující postup:
 - Bublíny: jednoduše vyplňte **OMNITEMPEM KB**
 - Při zlomení krátce po zhotovení : spojte ulomené části čerstvě namíchaným **OMNITEMPEM KB**
 - Oprava starších (nošených) provizorních náhrad: frézku zdrsňte povrch zlomeného místa a srovnejte s podsekřivinami. Na preparované zlomené místo naneste bond a vytvrděte podle pokynů výrobce (příbalového letáku). Zatékavý materiál aplikujte na připravené plochy, zlomené části spojte a vytvrděte podle pokynů výrobce (příbalového letáku).

Podmínky skladování:

Skladování výrobku při teplotě 4°C – 23°C. Nepoužívejte po uplynutí expirace. Kartuše skladujte na suchém a tmavém místě, tzn. v uzavřeném balení, v zásuvce atd.

Druhy přípravků v obchodní síti:

Balení kartuše, 10 ks mísících kanyl

obj.č. 85313 **A2**

obj.č. 85424 **A3**

Naše přípravky jsou určeny pro použití ve stomatologii. Pro použití námi dodávaných přípravků poskytujeme naše ústní a/nebo písemná upozornění resp. rady podle našeho nejlepšího vědomí pouze nezávazně. Naše upozornění a/nebo rady vás neomezují v tom, že námi dodávané přípravky vyzkoušíte k zamýšleným účelům použití. Protože dojde k použití našich přípravků bez naší kontroly, je to pouze na Vaši vlastní zodpovědnost. Samozřejmě zaručujeme kvalitu našich přípravků odpovídajících příslušným platným normám stejně jako standardu stanoveného ve všeobecných dodacích a prodejních podmínkách.

Výrobce:

Dental-Union GmbH

Gutenbergring 7-9

D-63110 Rodgau

Nieder-Roden

Distributor:

Janda-Dental a.s.

Březinova 1739, 440 01 Louny

Tel.: 415 653 201

E-mail: info@janda-dental.cz

www.janda-dental.cz