

OMNIWHITE SMILE **-profesionální systém bělení pro domácí použití-**

Profesionální systém domácího bělení vitálních a devitálních zubů s individuálními nosiči (Home-Bleaching).

10% klasický. Ideální pro použití přes noc.

16%-den a noc. Je možné zvolit dobu aplikace –přes noc nebo přes den.

22%-přes den. Správná volba pro krátkodobou aplikaci zubních nosičů.

Sada bělení **10%**, 3x teplem tvarovatelná fólie, 5x3 ml bělicího gelu, pouzdro na nosič

26447

Sada bělení **16%**, 3x teplem tvarovatelná fólie, 5x3 ml bělicího gelu, pouzdro na nosič

26448

Sada bělení **22 %**, 3x teplem tvarovatelná fólie, 5x3 ml bělicího gelu, pouzdro na nosič

26449

Náhradní stříkačka 3 ml bělicího gelu 10%

26450

Náhradní stříkačka 3 ml bělicího gelu 16%

26451

Náhradní stříkačka 3 ml bělicího gelu 22%

26478

Stříkačka 1ml, gel na vyblokování dásní, zásobník

26483

Některá doporučení pro lepší výsledky:

Před aplikací zuby důkladně vyčistěte.

Stříkačku vyjměte z obalu a odstraňte čepičku kanyly.

Pro každý zub, který chcete vybělit, naneste do zubních nosičů malé množství OMNI WHITE bělicího gelu – cca velikost hrášku (obr. č.1). Obsahem jedné stříkačky lze naplnit 6 nosičů.

OMNI WHITE bělicí gel je k dostání v různých koncentracích. Čím je vyšší podíl karbamidu peroxidu, tím se snižuje doba aplikace nosičů. Nosiče by měly být aplikovány přes den nebo v noci po dobu 1-4 hodin. Doba trvání aplikace je 5-10 dní. Vyplněné nosiče nasad'te před příslušnou řadu zubů (obr.č.2).

Jestliže bylo vytlačeno větší množství gelu, je možné ho odstranit navlhčeným prstem nebo zubním kartáčkem. Po bělení zuby důkladně vyčistěte. Zubní nosiče vypláchněte studenou vodou případně vyčistěte zubním kartáčkem.

Skladování: Zubní nosiče a gel skladujte v chladu.

Tip: Dojde-li ke zvýšené citlivosti zubů, vyplňte nosiče gelem s obsahem fluoridu nebo zubní pastou pro citlivé zuby a aplikujte po dobu 5 minut před nebo po ošetření.

Další požadované informace Vám poskytne Váš ošetřující zubní lékař.

Vedlejší účinky:

Případná zvýšená citlivost zubů. Zřídka: bolestivá citlivost zubů, diskolorace zubů, podráždění dásní. Všechny vedlejší účinky jsou dočasné a odeznějí 1-3 dny po ukončení ošetření.

Další upozornění:

Zabraňte kontaktu se sliznicí, očima a pokožkou. Dojde-li přesto ke kontaktu, okamžitě opláchněte postižené místo vodou. V případě zasažení očí, je ihned vypláchněte vodou a vyhledejte očního lékaře.

Skladování:

Skladujte v suchu a chladu. Materiál nezamrazujte. Skladujte mimo dosah dětí.

Obsažené látky:

Glycerin, Karbamid Peroxidu, Tromethamin, Carbopol a aroma.

Balení obsahuje 3 ml bělicího gelu ve stříkačce.

Výrobce:

Dental-Union GmbH

Gutenbergring 7-9

D-63110 Rodgau

Nieder-Roden

Dovozce a distributor:

Janda-Dental a.s.

Husova 2708, 440 01 Louny

Tel.: 415 653 201

E-mail: info@janda-dental.cz

www.janda-dental.cz