

Smart – desinfekční prostředek na medicínský inventář, stomatologické koncovky

Obj. č. 111359 – 10l kanistr

Obj. č. 111360 – 1 l rozprašovací lahev

Typ přípravku:

Vysoce účinný desinfekční prostředek pro rychlou a účinnou desinfekci medicínského a stomatologického inventáře /malých ploch/ a stomatologických koncovek k okamžitému použití. Bez parfému.

Rozsah použití:

Rychlá desinfekce určená k okamžitému použití – neředěný nastříkat ze vzdálenosti cca 30 cm až do úplného pokrytí dezinfikovaných ploch nebo předmětů. Desinfekční prostředek nechte působit celoplošně, resp. setřete přebytečné množství přípravku jednobarevnou utěrkou určenou pro jednorázové použití. Odolný proti korozi. Vhodný pro plochy citlivé na alkohol (není vhodný pro akrylové sklo, přírodní a umělou kůži). Zařazen na seznamu VAH (výrobce produktu).

Spektrum účinnosti:

Působí baktericidně (vč. MRSA), mykobaktericidně - Mycobacterium terrae , fungicidně, tuberkulocidně, „omezeně virucidně“ (deaktivuje obalené viry např. HBV,HIV,HCV, H1N1 –prasečí chřipka,Vaccinia). Testován pod vysokým organickým zatížením.

Doba expozice (koncentrát):

Baktericidně (vč.MRSA) a mykobaktericidně, fungicidně podle VAH/DGHM (vysoké zatížení): **po 1 min.**

Tuberkulocidně podle VAH/DGHM (vysoké zatížení): **po 1 min.**

Obalené viry (např. HBV,HIV, HCV, H1N1-prasečí chřipka,Vaccinia): **během 30 sekund**

Aktivní složky:

Účinné látky ve 100g:

43,0 g Ethanol, 8,0 g 1-Propanol, 0,04 g didecyldimethylammonium chloride, voda, pomocné látky

Bezpečnostní opatření:

Chraňte před teplem, jiskrami, otevřeným ohněm, horkými povrchy jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Skladujte v pevně uzavřených obalech. Bod vzplanutí podle DIN 51755: cca 27°C. Spotřeba max. 50 ml na m³. Celkové spotřebované množství na jednu místnost nesmí být větší než 100 ml na m³ půdorysné plochy. Při práci používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle nebo obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte pokožku vodou/osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Minimálně 15 minut opatrně vyplachujte vodou. Eventuelně vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. Při přetrvávajícím potížení kontaktujte lékaře/ vyhledejte lékařskou pomoc. Skladujte v chladu na dobře větraném místě. Balení zcela vyprázdněte, dopravte do skladu recyklovatelných odpadů . Zlikvidujte v souladu s místními úředními předpisy.

H226 Hořlavá kapalina a páry

Výrobce:
Dental-Union GmbH
Gutenbergring 7-9
D-63110 Rodgau
Nieder-Roden

Distributor:
Janda-Dental a.s.
Březinova 1739, 440 01 Louny
Tel.: 415 653 201
E-mail: info@janda-dental.cz
www.janda-dental.cz