



SMARTDRILL

Způsob použití:

Určeno k čištění a desinfekci vrtáků a rotačních nástrojů všech typů.

Pokyny k použití:

Desinfekční lázeň pro vrtáky je roztok připravený k okamžitému použití. Nástroje vložte ihned po jejich použití do neředěného roztoku. Vrtáky musí být do desinfekčního prostředku zcela ponořeny. Po uplynutí doby působení je vyjměte, opláchněte vodou a osušte. Nemíchejte s čistícími prostředky ani jinými desinfekčními prostředky. Nevhodné pro hliník.

Spektrum působení:

Baktericidní podle VAH/DGHM, EN 13727 a EN 14561. Fungicidní na kvasinky (*Candida albicans*) podle VAH/DGHM, EN 13624 a EN 14562. Tuberkulocidní podle VAH/DGHM, „omezeně virucidní“ (účinné proti obaleným virům, např. HBV, HIV, HCV) podle BGA(RKI)/DVV.

Doba působení:

Bakterie podle VAH/DGHM EN 13727, EN 14561 (vysoké zatížení):

Konc.: 15 min.

Candida albicans podle VAH/DGHM EN 13624, EN 14562 (vysoké zatížení):

Konc.: 15 min.

TbB (tuberkulóza)-inaktivace (*M. terrae*) podle VAH/DGHM:

Konc.: 30 min.

Obalené viry (např. HBV, HIV, HCV) podle BGA(RKI)/DVV (se zatížením):

Konc.: 15 min.

100 g obsahuje:

0,30 g didecylmethylpolyoxyethylammoniumpropionat, 0,36 g bis(3-aminopropyl)dodecylamin